

Gesichtsschutzmaske ACM

Augenschutz, Nasenschutz, Mundschutz in einem – **Besonderheit:** Die Maske ist um das Kinn herumgezogen, sowie auch seitlich um das Gesicht.

Gefertigt aus PETG-Kunststoff, PETG ist Lebensmittelecht, sehr schlagfest. Die Maske kann über einen sehr langen Zeitraum, je nach Pflege, verwendet werden.

Innen ausgestattet mit einem auswechselbaren Stirnpolster, befestigt mit Klett- und Flauschband, dieses Polster kann dann nach Tagen oder Wochen, je nach Verschmutzungsgrad, ausgewechselt werden.

Optimale, passgenaue und angenehme Einstellung mit einem Elastikband und einer Schnalle für jede Kopfform.

Die Maske hat ein Gewicht von 150 Gramm.

Im Stirnbereich, von außen, gibt es die Möglichkeit die Maske mittels Aufkleber zu gestalten (z.B. Firmenlogo etc.) oder zu personalisieren (z.B. Name etc.). Gesichtsschutzmaske für den Einsatz in allen Bereichen des täglichen Lebens- Privat oder bei der Arbeit, in Arztpraxen, als Auslieferungsfahrer, zum Einkaufen, in der Gastronomie etc. etc.

Die Gesichtsschutzmaske erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

- Die Gesichtsschutzmaske schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben.
- Die Gesichtsschutzmaske soll gegen Gefährdungen durch Tröpfcheninfektionen schützen und damit die Verbreitung des Corona-Virus reduzieren. Anwendungen der Gesichtsschutzmaske liegen im medizinischen Bereich, der Pflege, dem Rettungswesen und anderen von COVID-19 betroffenen Arbeitsgebieten, welche den gleichen Schutzzweck benötigen.
- Die Gesichtsschutzmaske bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkung, Stöße, Splitter, mechanische Teile und ähnliches.
- Die Gesichtsschutzmaske ist kombinierbar mit Schutzbrillen, persönliche korrigierende Brillen und Atemschutzmasken.
- Unbedenklichkeit: Von den eingesetzten Materialien für die Gesichtsschutzmaske ist nicht bekannt, dass sie für den Benutzer schädlich sind oder Hautreizungen verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können.
- Gesichtsschutzmasken sollen ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, rissig oder anderweitig beschädigt sind, Änderungen in Form und Farbe zeigen, Chemikalien, Ölen oder Fetten ausgesetzt waren, großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren. Schäden sind für den Endbenutzer möglicherweise nicht sichtbar.

Beschichtung und Pflegehinweis:

Die Außenseite des Visiers ist mit einer Anti-Scratch Beschichtung versehen. Sie zeichnet sich durch eine enorme Kratzfestigkeit, sowie resistent gegenüber Chemikalien und Lösemittel aus. Eine Reinigung mit Desinfektionsmittel ist jederzeit möglich.

Die Innenseite des Gesichtsschutzes ist mit einer neuartigen Anti-Fog Beschichtung ausgestattet. Ein Beschlagen (Anlaufen) der Scheibe während des Gebrauches ist damit weitgehendst ausgeschlossen. Da es sich um eine aktive Beschichtung handelt, ist eine Reinigung nur mit einem feuchten Tuch und Seife vorzunehmen.

**Deutsches Gebrauchsmuster angemeldet.
Amtliches Aktenzeichen: 20 2020 001 959.3**

Produkt – Made in Germany